

SARS-CoV-2

Antigen Self Test Nasal

Beknopte handleiding voor patiënten

Deze handleiding dient als naslag voor het gebruik van de **SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal**. Het is van belang dat u eerst de gebruiksaanwijzing voor patiënten leest voordat u deze test gebruikt.

IVD

CE



Belangrijke veiligheidsinformatie

⚠️ Waarschuwing!


- Was voordat en nadat u de test uitvoert uw handen met water en zeep of gebruik een desinfecterende handgel.
- Houd het wattenstaafje schoon. Raak het uiteinde van het wattenstaafje niet aan en zorg ervoor dat het niet in contact komt met andere oppervlakken voordat u het gaat gebruiken.
- Gebruik de testkit slechts eenmaal.
- Vermijd contact met de huid en ogen. Mocht u per ongeluk in contact komen met het product, spoel direct goed om huidirritatie te voorkomen. Raadpleeg uw arts als u zich zorgen maakt. Zorg ervoor dat bij het morsen van het product alles grondig gereinigd wordt met een geschikt desinfectiemiddel.
- Plaats de testonderdelen, met uitzondering van het bij de kit inbegrepen wattenstaafje, niet in het lichaam. Slik geen onderdelen in.

Onderdelen van de testkit

Foliezakje 1 met een testcassette en een droogmiddelzakje (x5)

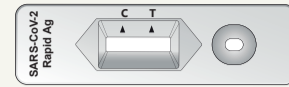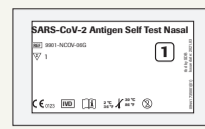


Foliezakje 2 met 5 buisjes met vloeistof en 5 spuitmondoppen (x1)

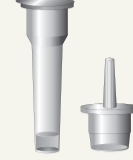

Steriel wattenstaafje



Buishouder

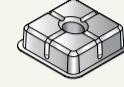


Benodigd, niet meegeleverd, materiaal:


- Timer
- Tissue

1 Een test voorbereiden

1. Lees de gebruiksaanwijzing voor patiënten voor de **SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal** zorgvuldig door.
2. Was voordat u de test uitvoert uw handen met water en zeep of gebruik een desinfecterende handgel.




3. Controleer de vervaldatum  achter op de foliezakjes. Gebruik de test niet als de vervaldatum verstreken is.

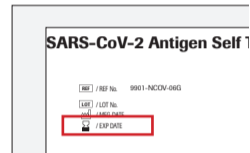


4. Open een van de foliezakjes **1** door het langs de scheurlijn open te trekken en neem de testcassette en het droogmiddelzakje uit de verpakking.

5. Controleer of de testcassette intact is en er zich geen groene druppels in het droogmiddelzakje bevinden. Open het droogmiddelzakje niet.

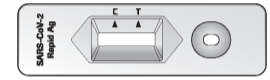


2 Neusmonster nemen en voorbereiden

1. Open foliezakje **2** door het langs de scheurlijn open te trekken, haal een van de buisjes met vloeistof en een spuitmondop eruit en leg deze op tafel.
2. Open het buisje voorzichtig zonder vloeistof uit het buisje te morsen. Plaats het buisje in de buishouder.

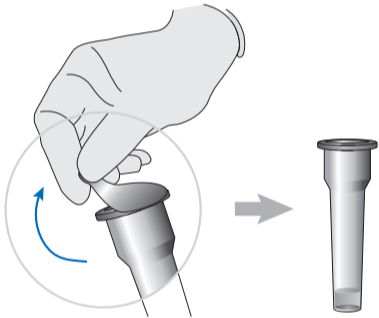


3. Snuit eenmaal uw neus met een tissue.
4. Haal het wattenstaafje uit de verpakking. Zorg ervoor dat u alleen het stokje van het wattenstaafje aanraakt en niet het gewatteerde uiteinde.

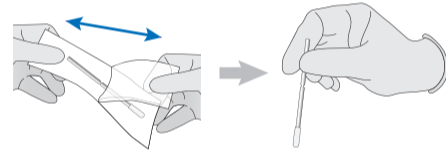


5. Kantel uw hoofd iets naar achteren.
6. Steek het wattenstaafje met het gewatteerde uiteinde naar u toe in uw linker neusgat. Duw het wattenstaafje langzaam 2 cm naar voren (parallel aan uw gehemelte – niet omhoog) totdat u weerstand voelt. Oefen geen druk uit.

7. Draai het wattenstaafje 4 keer (gedurende ongeveer 15 seconden) tegen de binnenkant van de neuswand en verwijder het daarna uit het neusgat.

8. Herhaal stap 6 en 7 voor uw rechter neusgat; gebruik hiervoor hetzelfde wattenstaafje.
Opmerking: Er moeten met hetzelfde wattenstaafje monsters van beide neusgaten worden genomen.

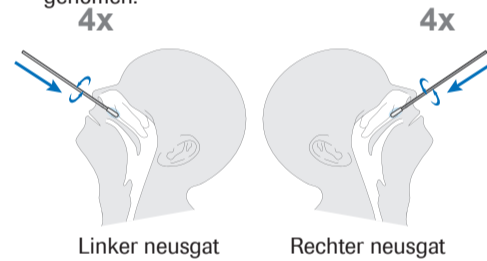


9. Steek het wattenstaafje in het buisje, totdat het gewatteerde uiteinde in de vloeistof zit. Knijp het buisje aan de onderkant in en houd het stevig vast. Roer het wattenstaafje meer dan 10 keer om het biologische materiaal van het wattenstaafje naar de vloeistof over te brengen.
10. Verwijder het wattenstaafje terwijl u de zijden van het buisje indrukt om de vloeistof uit het wattenstaafje te extraheren. Werp het wattenstaafje weg en sluit het buisje stevig af met de spuitmondop.

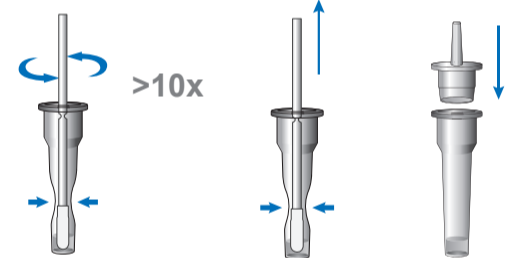

WAARSCHUWING! Als niet in het buisje wordt geknepen, kan dit onjuiste resultaten tot gevolg hebben doordat het wattenstaafje overtollige buffer opneemt.

3 Een test uitvoeren

1. Plaats de testcassette op een vlakke ondergrond.
2. Houd het buisje rechtop boven de ronde well, zoals op de afbeelding hieronder is weergegeven (niet boven het rechthoekige resultatenvenster).

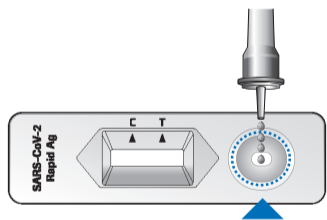

4 druppels

3. Laat precies 4 druppels op de ronde well vallen. Knijp, indien nodig, de zijden van het buisje zachtjes in.
Opmerking: U kunt ook verder met de test als u per ongeluk 5 druppels op de testcassette laat vallen.

4. Zet een timer en lees na 15 tot 30 minuten het testresultaat af.


WAARSCHUWING! Testresultaten die worden afgelezen **voordat de 15 minuten of nadat de 30 minuten voorbij zijn**, kunnen **onjuist** zijn.



5. Was nadat u de test uitvoert uw handen met water en zeep of gebruik een desinfecterende handgel.

4 Resultaten interpreteren


Ongeldig testresultaat

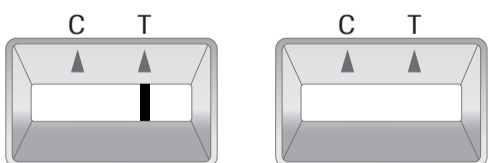

1. Het resultaat is ongeldig als de controlestreep (C) niet zichtbaar is. De test werkt niet naar behoren en u dient nog een test uit een andere testkit uit te voeren.

U hebt de test mogelijk niet goed uitgevoerd. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door en voer de test nogmaals uit. Neem contact op met uw arts of een coronatestcentrum indien het testresultaat opnieuw ongeldig is.

Positief testresultaat

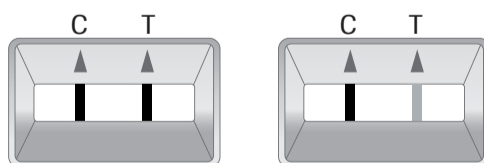


2. Indien zowel de teststreep (T) als de controlestreep zichtbaar zijn, is het resultaat positief.

Kijk goed naar het resultaat: De test is positief als er twee strepen zichtbaar zijn – zelfs als deze zeer licht zijn.

Bij een positief testresultaat is het zeer waarschijnlijk dat u besmet bent met COVID-19. Neem onmiddellijk contact op met uw dokter/huisarts of uw lokale gezondheidsautoriteit en volg de lokale richtlijnen omtrent zelfisolatie. Uw dokter vraagt u wellicht een PCR-test uit te laten voeren om het resultaat te bevestigen.

Negatief testresultaat

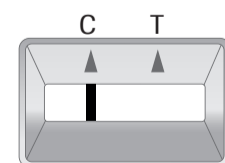

3. Indien de controlestreep (C) zichtbaar is (ongeacht hoe licht deze is) en de teststreep (T) niet, betekent dit dat het resultaat negatief is. Het is onwaarschijnlijk dat u besmet bent met COVID-19.

Houd u desalniettemin aan alle hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, ook als uw test negatief is. Als u vermoedt dat u bent besmet (dat wil zeggen u hebt langdurige symptomen of uw symptomen verergeren), neemt u contact op met uw dokter/huisarts. U hebt mogelijk een andere infectie of uw testresultaat is onjuist. U kunt na 1-2 dagen de test herhalen, aangezien COVID-19 niet in alle infectiestadia volledig nauwkeurig kan worden vastgesteld.